

# Guía Rápida del Usuario (Guía completa en [www.retiplus.com](http://www.retiplus.com))

## Controller Retiplus®

Sensor Rejilla de Amsler (10s\*)

Botón Bloqueo de Petaca (10s\*)  
+ Detener imagen (Modo Foto) (1s\*)

Botón Funciones (Solo en MODO AVANZADO \*\*)

Cambia las Funciones (V,Z,E,B,C) (1s\*)  
+ Resetea cada Vista en servicio a los  
Valores que calibró el Especialista (10s\*)

Estos 3 sensores

+ el Trackpad

se anulan y quedn

**CANCELADOS por RETIPLUS**

Conector para el cable de las Gafas

Botón ON/OFF (10s\*)  
+ REPOSO Pantalla (1s\*)

Indicadores LED

Indica el estado de la Petaca

Conmutador ( + - ) (1s)

Solo para V en Modo Básico

Para V,Z,E,B,C en Modo Avanzado

Conector micro-USB

Alimentación por cable USB

Trackpad

**CANCELADO por RETIPLUS**

\* Pulsación corta de 1 segundo

\* Pulsación larga de 10 segundos

\*\* MODO AVANZADO que activa el Optometrista